

Guide de découpe

Développé par des professionnels de santé



Biatain® Silicone Non-Border

Développé par des professionnels de santé pour des professionnels de santé

Ce guide de découpe a été élaboré pour vous accompagner dans l'utilisation de **Biatain® Silicone Non-Border** et pour vous aider à offrir un traitement adapté à vos patients.

Les différents cas d'utilisation sont basés sur l'expérience clinique et pratique d'infirmier(e)s en soins des plaies qui ont partagé leurs connaissances avec nous. Le guide contient divers exemples de la façon dont le pansement peut être découpé pour traiter les plaies dans les zones où l'application pourrait être difficile. Tous les exemples présentés sont donnés à titre indicatif et il est recommandé de toujours choisir la taille du pansement et de le découper en conséquence afin qu'il s'adapte à chaque patient.


Biatain® Silicone Non-Border est un pansement hydrocellulaire micro-adhérent stérile à usage unique avec un adhésif en silicone doux. Un pansement secondaire est nécessaire pour la fixation, ce qui n'est pas illustré dans ce guide. **Biatain® Silicone Non-Border** peut également être utilisé avec une thérapie de compression. Il est recommandé de ne pas couvrir l'ensemble du produit avec un pansement secondaire occlusif.

Avant utilisation, toujours consulter le document « Instructions d'utilisation » fourni avec le produit et traiter la plaie conformément aux directives locales.

Table des matières

Présentation du produit	4
Conseils d'application	5
Pieds et jambes	6-15
Mains et bras	16-25
Aisselles et Poitrine	26-27
Tête et cou	28-30

Présentation du pansement

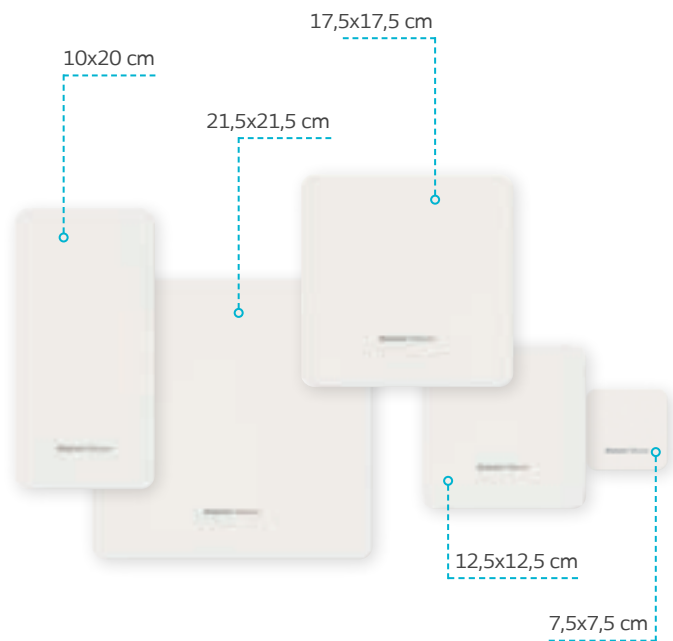

Biatain® Silicone Non-Border

Taille	Surface absorbante	Bte	Code GTIN	Réf.	Code LPP
7,5 x 7,5 cm	7,5 x 7,5 cm	10	5701780212250	390211	6310256
12,5 x 12,5 cm	12,5 x 12,5 cm	10	5701780212298	390231	6346900
10 x 20 cm	10 x 20 cm	10	5701780174558	390241	6346840
17,5 x 17,5 cm	17,5 x 17,5 cm	10	5708932730433	390271	6346863
21,5 x 21,5 cm	21,5 x 21,5 cm	10	5708932730457	390281	6346923

Conseils d'application

Avant utilisation, veuillez consulter la notice d'instruction livrée avec le produit.

1. S'assurer que la peau est propre et sèche.
2. L'utilisation de crèmes, lotions, pommades ou produits de préparation peuvent réduire la capacité du silicone à adhérer à la peau. Si un tel produit est utilisé, laisser sécher la peau autour de la plaie avant d'appliquer le pansement.
3. Lorsque vous êtes prêt à appliquer **Biatain® Silicone Non-Border**, retirer d'abord le film protecteur central puis appliquer sur la plaie. Ne touchez pas le côté adhésif de la mousse. Ensuite, appliquer le pansement le long de la peau au fur et à mesure que vous enlevez les films protecteurs restants. Si nécessaire, le pansement peut être découpé pour l'adapter aux zones difficiles à panser.
4. Appliquer la fixation selon votre protocole de thérapie de compression si cliniquement indiqué.
5. Changer le pansement lorsque cliniquement indiqué ou selon le protocole de votre établissement.
6. Changer de pansement lorsque des signes visibles d'exsudat approchent le bord de la mousse.



Hallux



Pour les plaies situées sur le gros orteil.

Taille du pansement de démonstration : 12,5 x 12,5 cm.

Plier le pansement et découper une forme triangulaire.
Appliquer entre le gros orteil et le deuxième orteil et plier autour du gros orteil avant de le fixer avec un bandage secondaire adapté.

Comment découper :



Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Hallux




Pour les plaies situées sur le gros orteil.

Taille du pansement de démonstration : 12,5 x 12,5 cm.

Couper deux coins du pansement et l'appliquer du côté extérieur du gros orteil avant de le fixer avec un bandage secondaire adapté.

Comment découper :

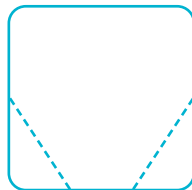

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Orteils



Entre les orteils




Pour les plaies situées à l'extrémité d'un orteil.

Taille du pansement de démonstration : 12,5 x 12,5 cm.

Couper le pansement en forme de croix. Tenir compte de la taille de l'orteil et des dimensions du pansement coupé pour une forme optimale. Fixer avec un bandage secondaire adapté.

Comment découper :

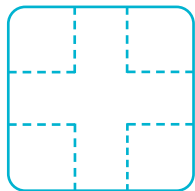


Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Pour les plaies situées entre les orteils.

Taille du pansement de démonstration : 7,5 x 7,5 cm.

Couper le pansement en forme de croix. Tenir compte de la taille de l'orteil et dimensions du pansement coupé pour une forme optimale. Fixer avec un bandage secondaire adapté.

Comment découper :

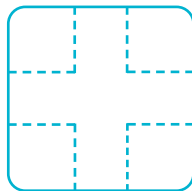

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Entre les orteils



Entre les orteils




Pour les plaies situées entre les orteils.

Taille du pansement de démonstration : 7,5 x 7,5 cm.

Découper une forme arrondie des deux côtés du pansement. Penser à arrondir les coins pour un meilleur ajustement. Fixer avec un bandage secondaire approprié.

Comment découper :

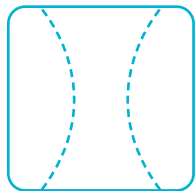

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Pour les plaies situées entre les orteils.

Taille du pansement de démonstration : 12,5 x 12,5 cm.

Plier le pansement et faites des incisions en fonction du nombre d'orteils à couvrir. Fixer avec un bandage secondaire approprié.

Comment découper :



Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Entre les orteils



Pour les plaies situées entre les orteils.

Taille du pansement de démonstration : 12,5 x 12,5 cm.

Découper des formes losanges en fonction du nombre d'orteils à recouvrir. Fixer avec un bandage secondaire adapté.

Comment découper :



Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Malléole




Pour les plaies situées autour de la malléole.

Taille du pansement de démonstration : 7,5 x 7,5 cm.

Découper une forme arrondie pour que le pansement s'adapte autour de la malléole (interne ou externe) du pied. Fixer avec un bandage secondaire adapté.

Comment découper :

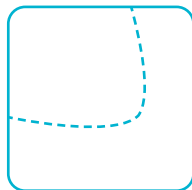

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Talon



Genou




Pour les plaies situées sur le talon.

Taille du pansement de démonstration : 17,5 x 17,5 cm.

Découper deux triangles de part et d'autre du pansement.. Appliquer la partie supérieure la plus large sur le tendon d'Achille et plier les parties latérales inférieures autour du talon avant de fixer avec un bandage secondaire approprié. Vous pouvez également utiliser **Biatain® Silicone Talon** pour cette localisation.

Comment découper :

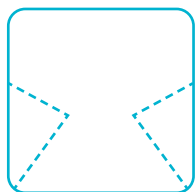

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Pour les plaies situées sur le genou.

Taille du pansement de démonstration : 10 x 20 cm.

Découper deux triangles de part et d'autre du pansement. Garder à l'esprit le besoin de mobilité du genou et que le pansement doit rester en place lors de la flexion et de l'extension du genou. Fixer avec un bandage secondaire adapté.

Comment découper :



Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Doigts



Entre les doigts




Pour les plaies situées à l'extrémité d'un doigt.

Taille du pansement de démonstration : 7,5 x 7,5 cm.

Découper le pansement en forme de croix. Tenir compte de la taille du doigt et des dimensions du produit découpé pour une forme optimale. Fixer avec un bandage secondaire approprié.

Comment découper :

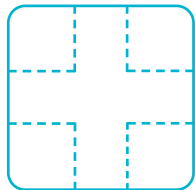


Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Pour les plaies situées entre les doigts.

Taille du pansement de démonstration : 7,5 x 7,5 cm.

Découper le pansement en forme de croix. Tenir compte de la taille des doigts et des dimensions du produit découpé pour une forme optimale. Fixer avec un bandage secondaire approprié.

Comment découper :

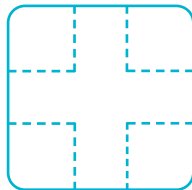

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Entre les doigts



Autour d'un doigt




Pour les plaies situées entre les doigts.

Taille du pansement de démonstration : 7,5 x 7,5 cm.

Découper une forme arrondie des deux côtés du pansement. Penser à arrondir les coins pour un meilleur ajustement. Appliquer entre les doigts. Fixer avec un bandage secondaire approprié.

Comment découper :

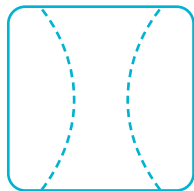


Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Pour les plaies situées entre les doigts.

Taille du pansement de démonstration : 7,5 x 7,5 cm.

Plier le pansement à environ 1/3 et faire une incision dans le pansement pour s'adapter au doigt. Si nécessaire, ajuster les côtés pour qu'il tienne entre les doigts. Fixer avec un bandage secondaire approprié.

Comment découper :

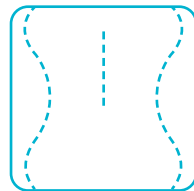

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration


Paume de la main



Pour les plaies situées sur la paume de la main.
Taille du pansement de démonstration : 10 x 20 cm.

Plier le pansement à environ 1/3 et découper 3 trous pour les doigts et un arrondi pour s'adapter à la base du pouce. Fixer avec un bandage secondaire adapté.

Comment découper :

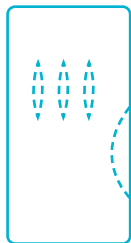

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Paume de la main



Pour les plaies situées sur la paume de la main.
Taille du pansement de démonstration : 12,5 x 12,5 cm.

Découper un trou dans le coin supérieur droit d'une taille appropriée pour s'adapter à l'index. Ensuite, découper un coin arrondi afin qu'il s'adapte à la paume de la main et à la base du pouce. Fixer avec un bandage secondaire adapté.

Comment découper :



Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Dos de la main




Pour les plaies situées sur le dos de la main.

Taille du pansement de démonstration : 12,5 x 12,5 cm.

Découper un trou dans le coin supérieur droit d'une taille appropriée pour s'adapter à l'index. Découper ensuite un coin arrondi pour épouser la forme du dos de la main. Fixer avec un bandage secondaire approprié.

Comment découper :

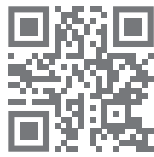

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Coude



Pour les plaies situées sur le coude.

Taille du pansement de démonstration : 10 x 20 cm.

Découper deux petits triangles de part et d'autre du pansement. Garder à l'esprit le besoin de mobilité du coude et que le pansement doit rester en place à la fois en flexion complète et en extension complète du coude. Fixer avec un bandage secondaire adapté.

Comment découper :



Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Épaule




Épaule



Pour les plaies situées sur l'épaule et autres zones angulaires.
Taille du pansement de démonstration : 17,5 x 17,5 cm.

Réaliser quatre incisions, une de chaque côté du pansement afin qu'il s'adapte à l'épaule. Fixer avec un bandage secondaire approprié ou une bande.

Comment découper :

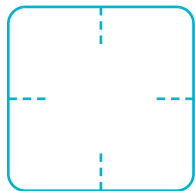


Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Pour les plaies situées sur l'épaule et autres zones angulaires.
Taille du pansement de démonstration : 17,5 x 17,5 cm.

Réaliser quatre incisions, une de chaque côté du pansement afin qu'il prenne une forme qui s'adapte aux articulations comme l'épaule ou autres zones anatomiques courbes. Fixer avec un bandage secondaire approprié ou une bande. Vous pouvez également utiliser **Biatain® Silicone Multisite** pour ces localisations.

Comment découper :

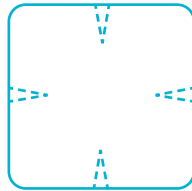

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration


Aisselle



Pour les plaies situées au niveau de l'aisselle.
Taille du pansement de démonstration : 17,5 x 17,5 cm.

Découper un arrondi dans le coin supérieur droit.
Fixer avec un bandage secondaire.

Comment découper :

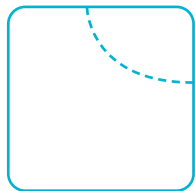

Scannez le QR code
pour voir la vidéo de
démonstration


Sous poitrine



Pour les plaies situées autour ou sous la poitrine.
Taille du pansement de démonstration : 10 x 20 cm.

Réaliser des incisions des deux côtés du pansement pour qu'il
s'adapte en dessous le sein (pertinent pour les cicatrices
d'opération mammaire). Fixer avec un bandage secondaire.

Comment découper :

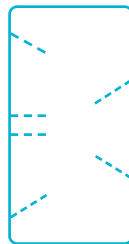

Scannez le QR code
pour voir la vidéo de
démonstration

Cou




Pour les plaies situées au niveau de la gorge et du cou.

Taille du pansement de démonstration : 10 x 20 cm.

Choisir une taille rectangulaire et effectuer des incisions des deux côtés du pansement pour qu'il s'adapte à la gorge. Placer le côté avec deux incisions le long des os de la clavicule et le côté avec trois incisions sous l'os de la mâchoire. Fixer avec un bandage secondaire approprié.

Comment découper :

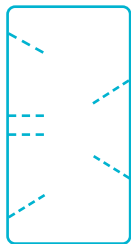

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Oreille




Pour les plaies situées autour de l'oreille.

Taille du pansement de démonstration : 12,5 x 12,5 cm.

Découper le pansement de manière à ce qu'il corresponde à la forme de l'oreille. Fixer avec un bandage secondaire approprié.

Comment découper :

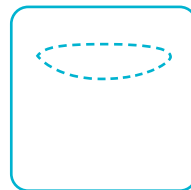

Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Derrière l'oreille



Pour les plaies situées derrière l'oreille.

Taille du pansement de démonstration : 7,5 x 7,5 cm.

Découper le pansement de manière à ce qu'il tienne derrière l'oreille. Fixer avec un bandage secondaire approprié.

Comment découper :



Scannez le QR code pour voir la vidéo de démonstration

Informations

L'ensemble de ces conseils de découpe sont également applicables au pansement hydrocellulaire Biatain® Non-Adhesive :

Biatain® Non-Adhesive

Taille	Surface absorbante	Bte	Code GTIN	Réf.	Code LPP
12,5 x 12,5 cm	12,5 x 12,5 cm	10	5708932655842	334271	6346900
10 x 20 cm	10 x 20 cm	10	5708932655828	334111	6346840
17,5 x 17,5 cm	17,5 x 17,5 cm	10	5708932400473	334180	6346863
21,5 x 21,5 cm	21,5 x 21,5 cm	10	5708932411073	334280	6346923

Retrouver les autres pansements de la gamme hydrocellulaire Biatain® :

Biatain® Silicone

Taille	Surface absorbante	Bte	Code GTIN	Réf.	Code LPP
Biatain® Silicone formes anatomiques					
Sacrum	15 x 19 cm	10,9 x 14 cm	5	5708932649636	334040 1324093
Sacrum	25 x 25 cm	17 x 17,2 cm	5	5708932649650	334050 1324667
Talon	18 x 18 cm	14 x 13,5 cm	5	5708932649681	334060 1306787
Multisite	14 x 19,5 cm	7,5 x 12,1 cm	5	5708932649704	334080 1397809

Biatain® Silicone

7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	10	5708932530828	334343	6346930
12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	10	5708932655149	334363	6346870
17,5 x 17,5 cm	13 x 13 cm	10	5708932530309	334384	6346828
10 x 20 cm	5,5 x 15,5 cm	10	5708932653992	334003	6346811
10 x 30 cm	5,5 x 25,5 cm	10	5708932648165	334011	6346828

Biatain® Silicone Lite

5 x 5 cm	2,2 x 2,2 cm	5	5708932636285	334520	6346975
5 x 12,5 cm	2,2 x 9,7 cm	10	5708932631518	334531	6346952
7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	10	5708932530859	334443	6346952
12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	10	5708932655170	334463	6346969
9 x 15 cm	5,5 x 11,5 cm	10	5708932746601	334560	6310606
10 x 25 cm	5,5 x 20,5 cm	10	5708932746625	334570	6310612

Biatain® Adhesive

Taille	Surface absorbante	Bte	Code GTIN	Réf.	Code LPP
Biatain® Adhesive®					
12,5 x 12,5 cm	8 x 8 cm	10	5708932655491	334201	6346870
17,5 x 17,5 cm	13 x 13 cm	10	5708932402712	334390	6346828
18 x 28 cm	10 x 20 cm	10	5708932400879	334261	6346892
Biatain® Sacrum^c					
23 x 23 cm	13 x 13 cm	5	5708932649346	334850	1374470
Biatain® Talon^c					
23 x 23 cm	16 x 14 cm	5	5708932649803	334871	1399955

Document réservé à l'usage des professionnels de santé

[Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle](#)

Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée
Siège social : Les Jardins du Golf - 6 rue de Rome - 93561 Rosny sous bois CEDEX - France
Capital social : 22 001 980 Euros - RCS BOBIGNY : 312 328 362 - SIREN : 312 328 362
SIRET : 312 328 362 00040 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 02865W - PM-22935 - juillet 2022 - PS

